

1




Estrarre dalla confezione la mascherina Piuma e due filtri Jtex Duo SFP 85

2


Girare la mascherina per aprire la fessura di inserimento dei filtri



3

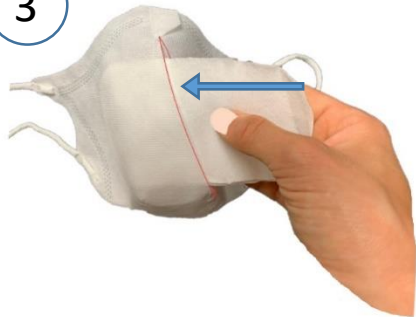

Inserire i due filtri nell'apposita fessura avendo cura di sistemarli su entrambi i lati

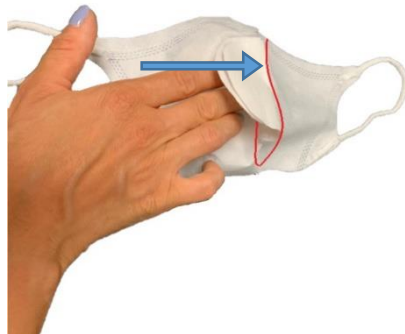

piuma 

4



Capovolgere la mascherina, lasciando all'interno (a contatto con il viso) la fessura d'ingresso dei filtri

5

Staccare protezione del biadesivo dal nasello in alluminio e applicare sulla porzione superiore della mascherina



6



Indossare mascherina dagli elastici laterali

piuma 



Articolo prodotto da Sigma Engineering S.r.l.
P.IVA 04796301002
sede legale e operativa: Via Valle dei Corsi, n°10 – 00013 Fonte
Nuova (RM) Tel. 06 9057329
Sistema Qualità aziendale EN ISO 13485:2016

Distribuito da: HOSPOTICA S.r.l
P.IVA 13987831008
sede legale: Via Giacomo Laurenzani, n°46 – 00133 Roma (RM)
sede operativa: Via Valle dei Corsi, n°10 – 00013 Fonte Nuova (RM)
Tel. 06 905 7329 Email: info@hospotica.it

piuma 

piuma



Istruzioni per l'uso

